

Instrunet Inibsa Spray

Desinfecção rápida de superfícies
de dispositivos médicos não submersíveis.

Agradável perfume a limão.
Desinfecção rápida de superfícies
de material médico resistentes ao álcool
(por exemplo, a cadeira do dentista).



Indicações e características

Rápido e eficaz. Amplo espectro de eficácia, sem aldeídos.

Modo de uso

Antes de utilizar, verificar se a zona a tratar e está limpa é compatível com o uso de álcool.

- 1 Pulverizar as zonas que deseja desinfetar até que estejam totalmente húmidas aplicando a quantidade necessária (+/- 40ml/m²).
- 2 Respeitar o tempo de contacto indicado para a actividade antimicrobiana desejada.
- 3 Só é necessário enxaguar caso a zona a tratar tenha estado em contacto com a pele ou mucosas.

Composição

Etanol (Nº CAS 64-17-5): 550 mg/g, propionato de N,N-didecil-N-metil-poli(oxetil)amonio (Nº CAS 94667-33-1): 1,1 mg/g, perfume.

Precauções de utilização

PERIGO. Líquido e vapor facilmente inflamáveis. Causa grave irritação ocular. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Usar um equipamento de protecção para os olhos/rosto. Eliminar o produto e o seu recipiente cumprindo todas as precauções de uso. Importante. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão acidental, consultar o **Centro Antivenenos**, tel. **800 250 250**. Uso reservado aos profissionais. Dispositivo médico. Fabricado em França.

Propriedades microbiológicas

Eficácia	Normas	Tempo de contacto
Bactericida*	EN 13697*, EN 13727*	30 segundos
Micobactericida*	EN 14348*	5 minutos
Levuricida*	EN 13697*, EN 13624*	30 segundos
Tuberculicida*	EN 14348*	30 segundos
Activo em virus encapsulados*	EN 14476*, EN 16777*	30 segundos
Virucida de espectro limitado	EN 14476*, EN 16777*	5 minutos (Adenovirus em 30 segundos Norovirus (MNV) em 5 minutos)

A atividade antimicrobiana do produto está no dossier científico, disponível mediante solicitação.

*=condições de limpeza.

Distribuído por:

Laboratórios Inibsa, S.A. Sintra Business Park, Edifício 1 2º I - 2710 - 089 Sintra (Portugal). T +351 219 112 730 | F +351 219 112 023

 **ANIOS.** 1, rue de l'Espoir- 59260 Lezennes. T +33 320 67 67 67 | F +33 320 67 67 68

Contacte-nos: 808 500 028 | www.inibsa.pt | ccinibsa@inibsa.com

Siga-nos em:  